

clinically for infants in low age. **Contraindications** : The use of **Gengigel® Baby** is contraindicated in case of hypersensitivity to one of its components. **Precautions of use and storage** : If **Gengigel® Baby** must be used at the same time as other products, consult your doctor. If the symptoms persist, consult a doctor. Do not use **Gengigel® Baby** if the tube is already open or damaged before its first use. Store at ambient temperature (between 5°C and 40°C), protect from direct sources of heat. Do not use after the date of expiry. Before closing the tube after use, eliminate all residues. Do not leave it out of the reach of children. Product for personal use.

Gengigel® Baby הינו ג'ל הרשום כפנטו ו מיועד לשימוש בחלל הפה מכיל מטריקס פולימרי חדשני אשר דרבק לחניכיים ולשיניים לזמן ממושך ויוצר שכבה בלתי נראית, גמישה וחזקה בעלת פעילות הגנה יעילה. **התוויות**: דלקות חניכיים האופייניות לתקופת הינקות, הנגרמות למשל מבקיעת שיניים או טראומות. ניסויים קליניים מראים כי השימוש **Gengigel® Baby** מפחית כאב ונפיחות ו מעודד ריפוי. **הוראות שימוש**: לאחר שטיפת ידיים יסודית יש למרוח כמות קטנה מהמוצר באמצעות האצבע ולעסות בעדינות על החניכיים עד לכיסוי מלא של האזור הנפגע. רצוי למרוח את המוצר לאחר ארוחות ולפני השינה כדי להבטיח את יצירת הציפוי ולהאריך את משך זמן ההקלה עבור הילד המטופל. יש להשתמש במוצר שלוש עד שש פעמים ביום, או לפי הצורך. **Gengigel® Baby** מאפשר הפחתה בשימוש בתרופות כגון מאלחשים מקומיים, והינו בעל טעם נעים. אינו מכיל אלכוהול או סוכר. אינו מכיל חומרי טעם מלאכותיים, גלופן, לקטוז, SLS או חומרים מהונדסים גנטי (GMOs).נבדק קלינית לשימוש בתינוקות. **התוויות נגד**: השימוש ב **Gengigel® Baby** אסור במקרה של רגישות יתר לאחד ממרכיביו. **אמצעי זהירות ואזהרות**: אין להשתמש במוצר אם קיים נזק הנראה לעין. יש לאחסן בטמפרטורת החדר, בין 5°C ל־40°C; יש להגן מפני מקורות חום ישיר. אין להשתמש לאחר פקיעת תאריך התפוגה. לפני סגירת המיכל לאחר השימוש, יש לסלק את כל שאריות המוצר. המוצר מיועד לשימוש אישי בלבד. יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים. אם נעשה שימוש במוצר זה יחד עם מוצרים נוספים יש להיוועץ ברופא.

Composition : / Composición / Zusammensetzung / Σύσταση / Samenstelling: / Composição / التركيب / Sklad / Složení / Zloženie / Compoziție / İçerik: / Состав: / Composizione / Compositioin : / التركيب :
Principal ingredient: / Ingrediente principal: / Hauptinhaltsstoff: / Κύριο συστατικό: / Belangrijkste ingrediënt: / Ingrediente principal: / المكونات الرئيسية / Główny składnik: / Hlavní složka: / Hlavná zložka: / Ingrediente principal: / Ana İçerik: / Основний компонент: / Ingrediente principale: / Composant principal: / مרכיבים נוספים : ■ Sodium Hyaluronate
Other ingredients: / Otros componentes: / Weitere Inhaltsstoffe: / Άλλα συστατικά: / Andere componenten: / Outros: / مكونات أخرى / Pozostałe składniki: / Seznam pomocných látek: / Zoznam pomocných látok: / Alte componente: / Diğr İçerikler: / Άλρι κομπονηντι: / Altri ingredienti: / Autres composants: / مרכיב עיקרי : ■ PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVMMA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA.
It may contain / Puede contener / It may contain / Μπορεί να περιέχει / kan bevatten / Pode conter / قد يحتوي على / może zawierać / Môže obsahovať / Môže obsahovať / Poate conține / İçerebilir / може містити / Può contenere / Peut contenir / גדול לדיכדי ■ Lactic Acid, Sodium Hydroxide





Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
 Made in EU

tube 02 PE-HD	cap 04 PE-LD	IFU 06 PP	box 22 PAP	box 21 PAP
plastic			paper	

Medical Device Class II a
 INTERNATIONAL PATENT
 MC20103EN/HA
 Release February 2025